



Jak používat Check-out

1

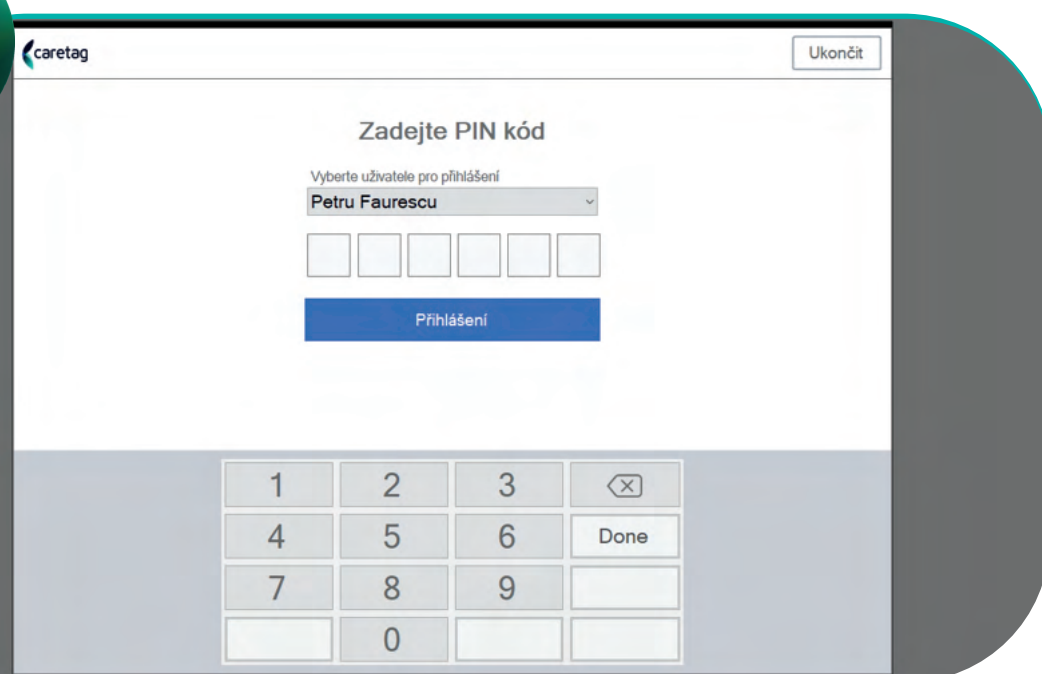


Přihlaste se svým šestimístným PINem.

2

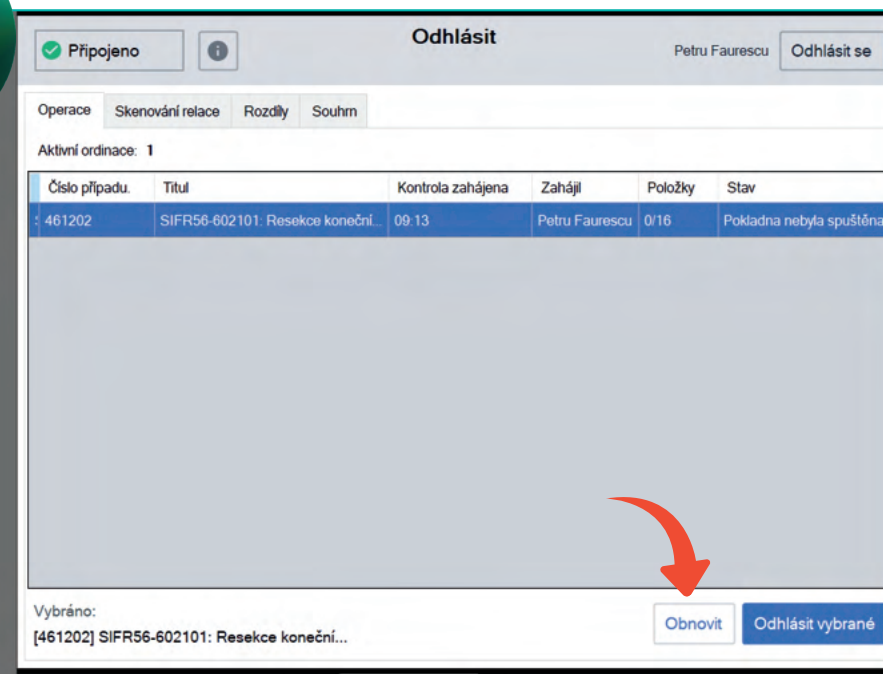


Klepnutím na „**Obnovit**“ aktualizujete seznam operací.

3

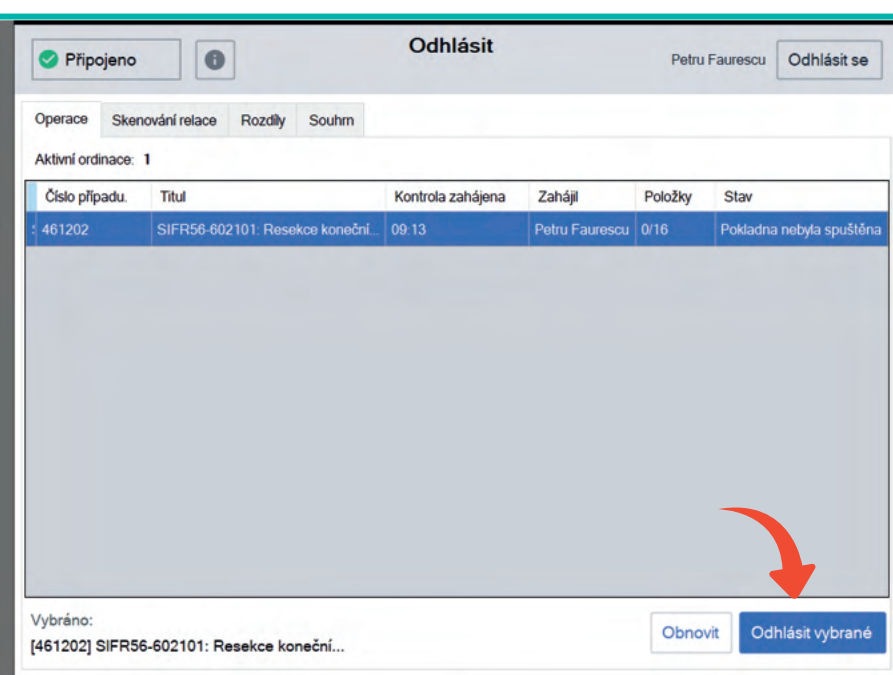


Vyberte operaci ze seznamu a klepněte na „**Zahájit check-out**“.

4

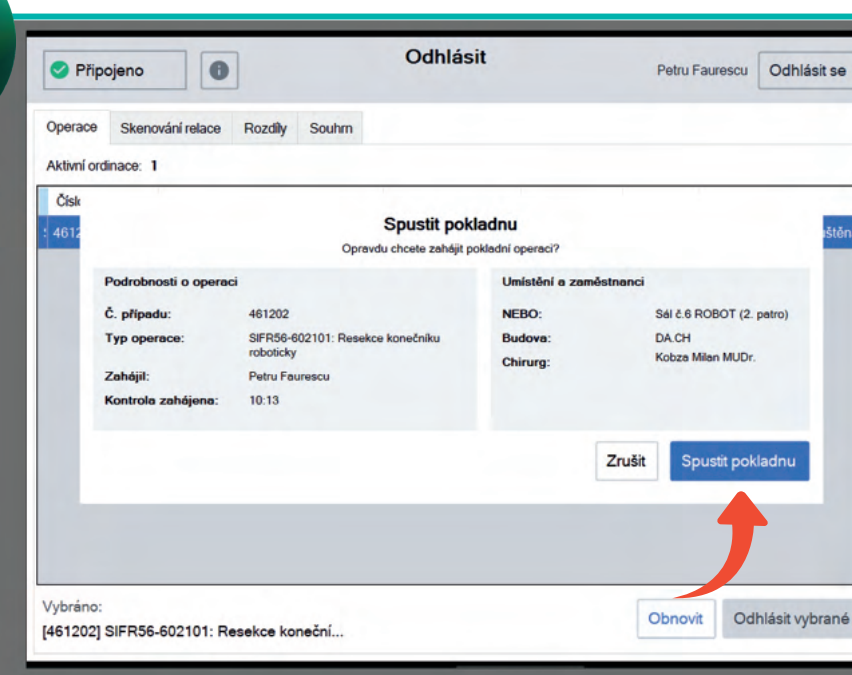

Zobrazí se vyskakovací okno s podrobnostmi o operaci. Klepněte na „**Zahájit check-out**“.

5

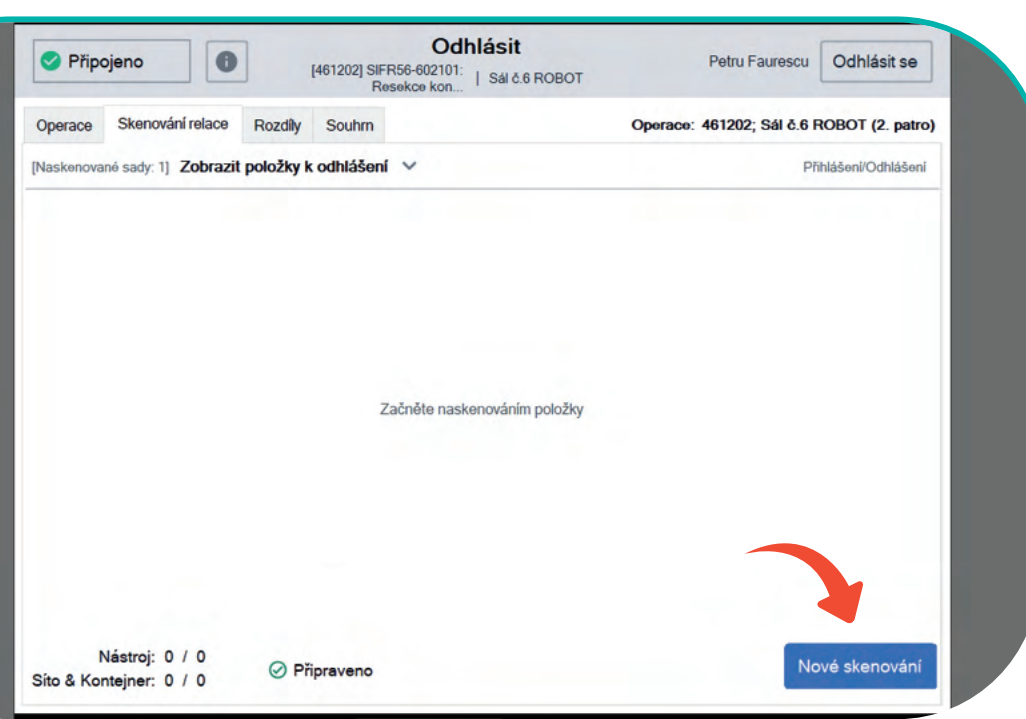

Klepnutím na „**Nové skenování**“ zahajte skenování.

6

Náskanované sady: 2 | Nástroje: 13 | Čas zahájení operace:


Popis	Štítek
URO PEK nefrostomie	Test
TRAUM háčky DESMARES	01

Při skenování jsou položky barevně odlišeny následovně:


Zelená: Odpovídá setovací kartě

Žlutá: Chybějící položky


Fialová: Přebývajících položky

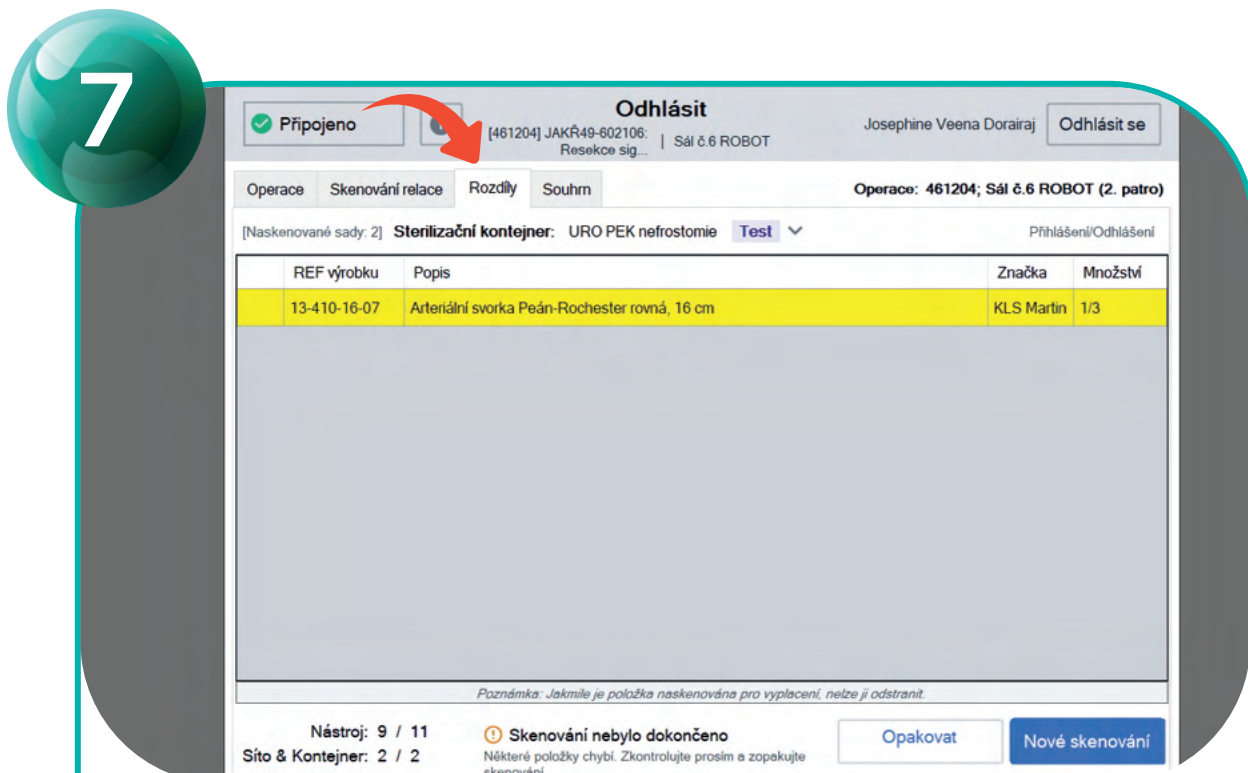


Klepněte na kartu „**Rozdíly**“ a zkontrolujte chybějící na přebývajícím nástrojů.

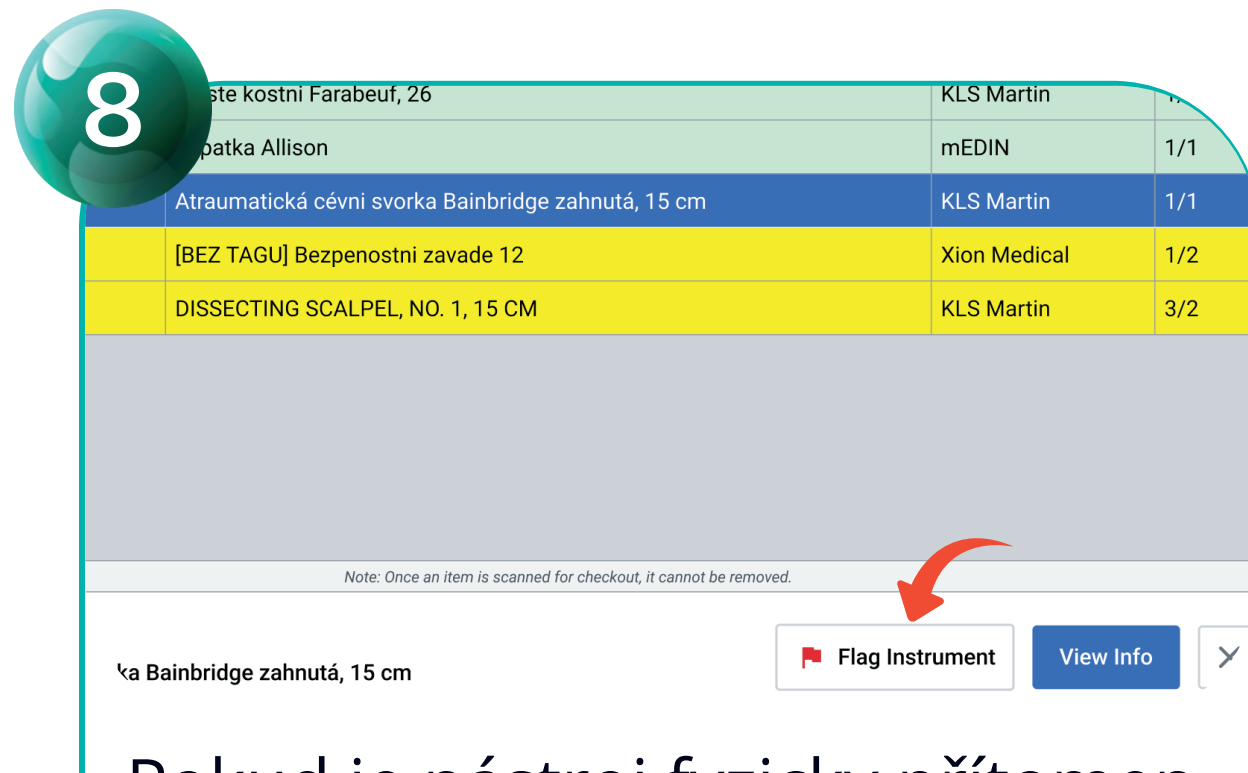


Pokud je nástroj fyzicky přítomen, ale nebyl rozpoznán, označte ho a klikněte na „**Flag Instrument**“, čímž odešlete servisní požadavek.

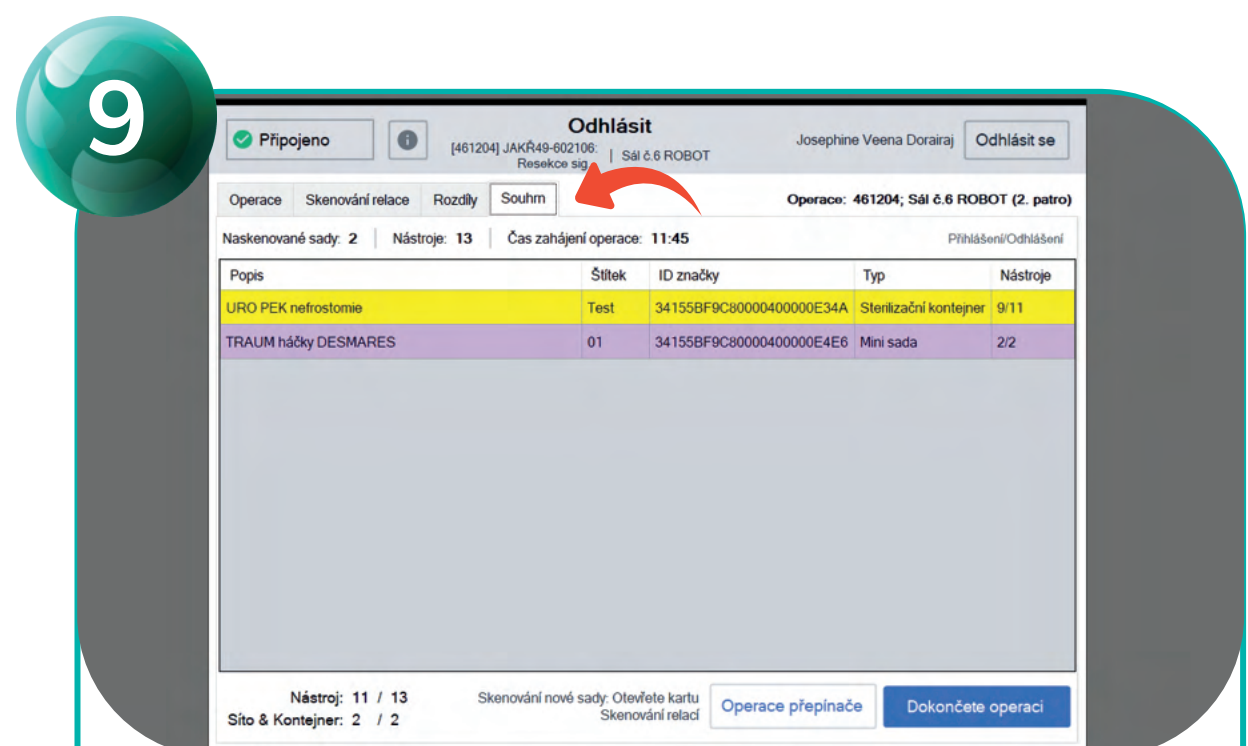


Pro zobrazení úplného přehledu klepněte na kartu „**Souhrn**“.

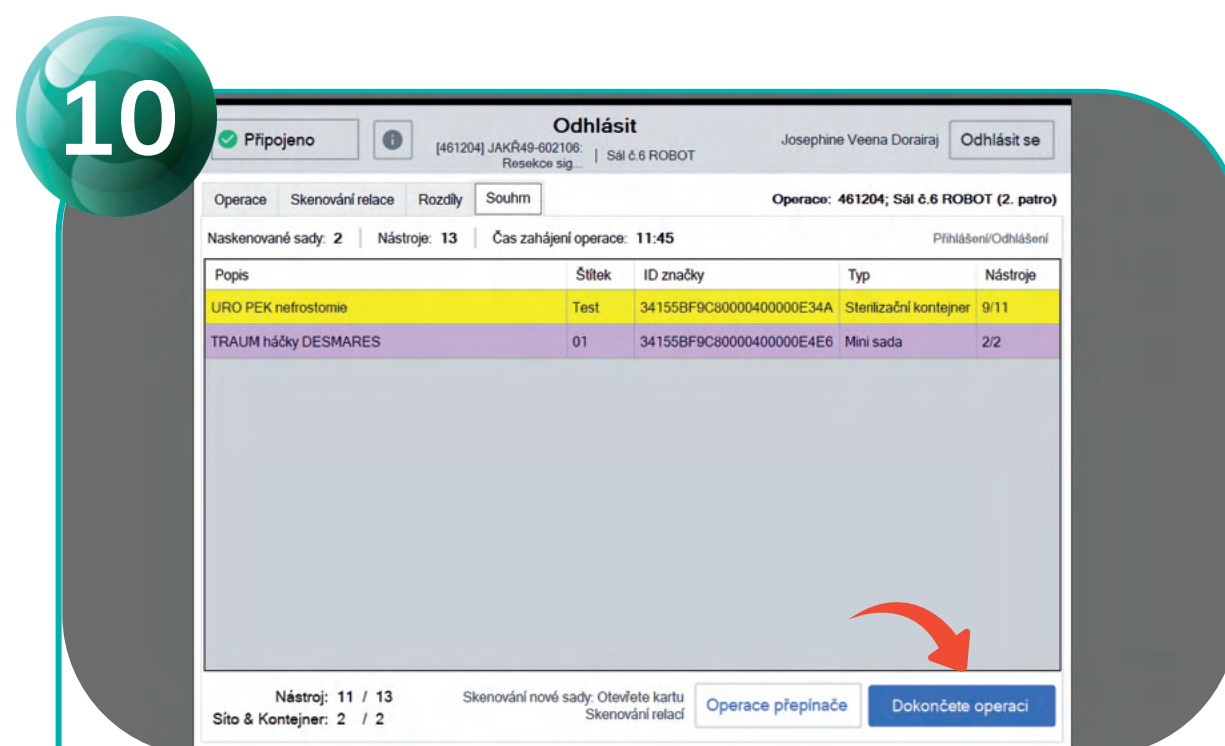

Pro ukončení check-outu klepněte na tlačítko „**Dokončit check-out**“

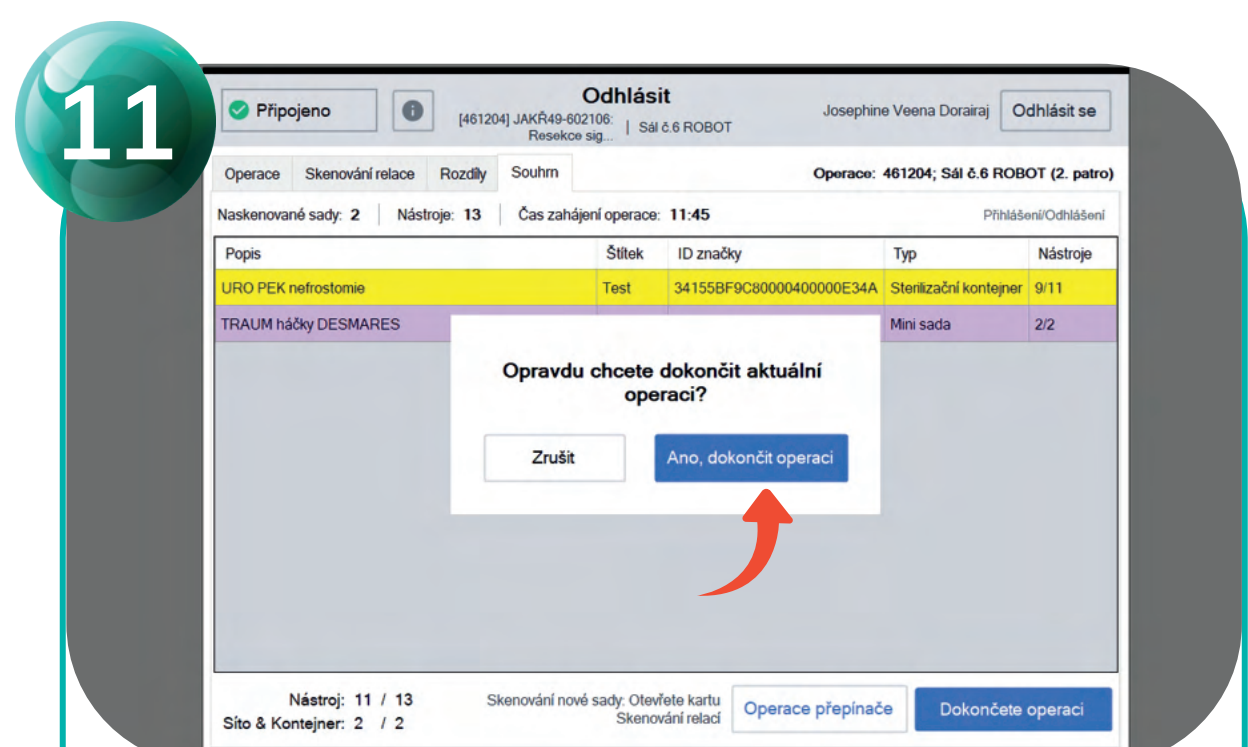

Potvrďte ukončení check-outu tlačítkem „**Ano, dokončit check-out**“

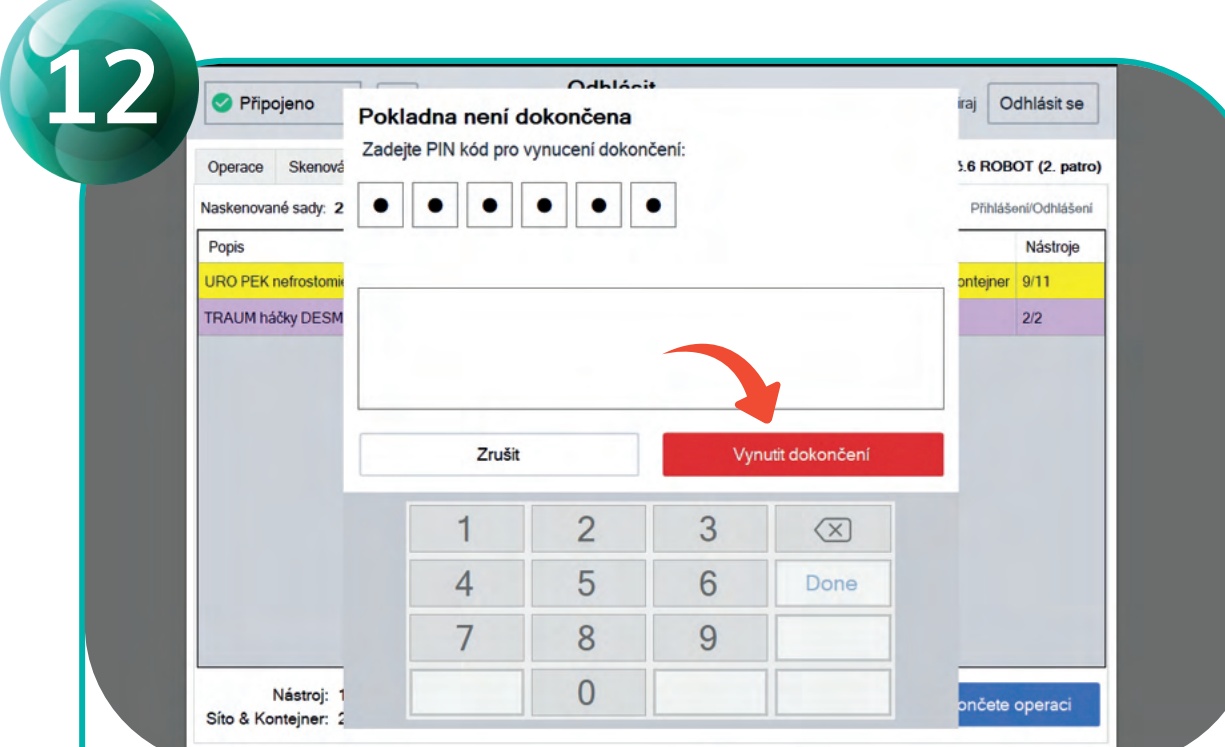

V případě neshod zadejte PIN a klepněte na „**Vynutit dokončení**“.