


Jak používat NEBO Info

1

Inteligentní OR informace stanice

Pro pokračování vyberte jednu z níže uvedených možností

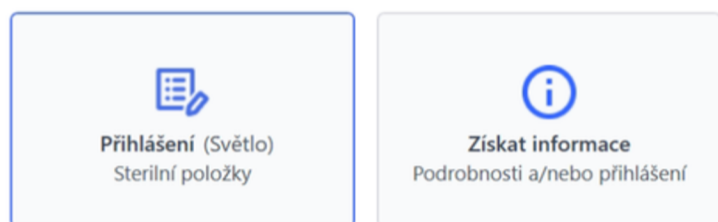


Pokračovat

Zvolte možnost „**Check-in**“ a klepněte na „**Pokračovat**“.

2

CHECK-IN
Vyberte NEBO

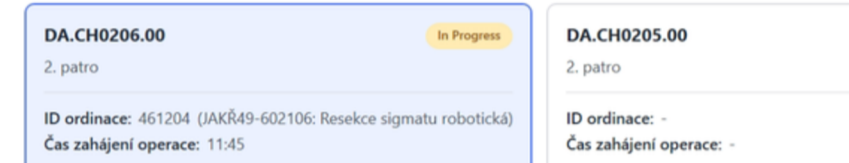

Zpět do hlavní nabídky

Pokračovat




Zvolte operační sál a klepněte na „**Pokračovat**“.

3

CHECK-IN - Sál 7.7 URO ENDO

Vybrat operaci

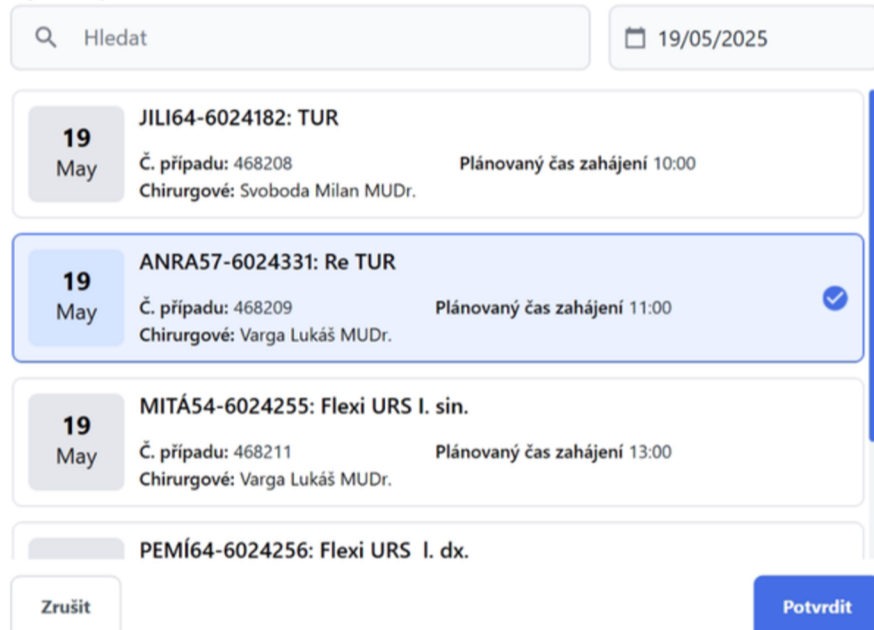


Vyberte operaci ze seznamu a klepněte na „**Zahájit check-in**“.

4

Informační stanice 13 Online

Josephine Veena Dorairaj

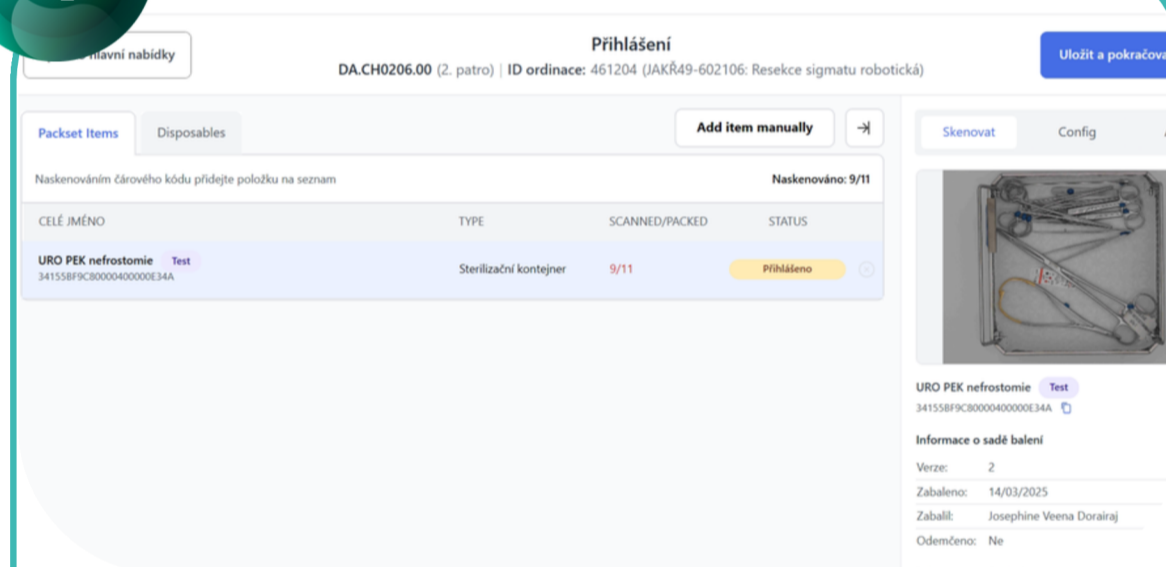


Postupně načtěte všechny nástroje.

5

Informační stanice 13 Online

Josephine Veena D.

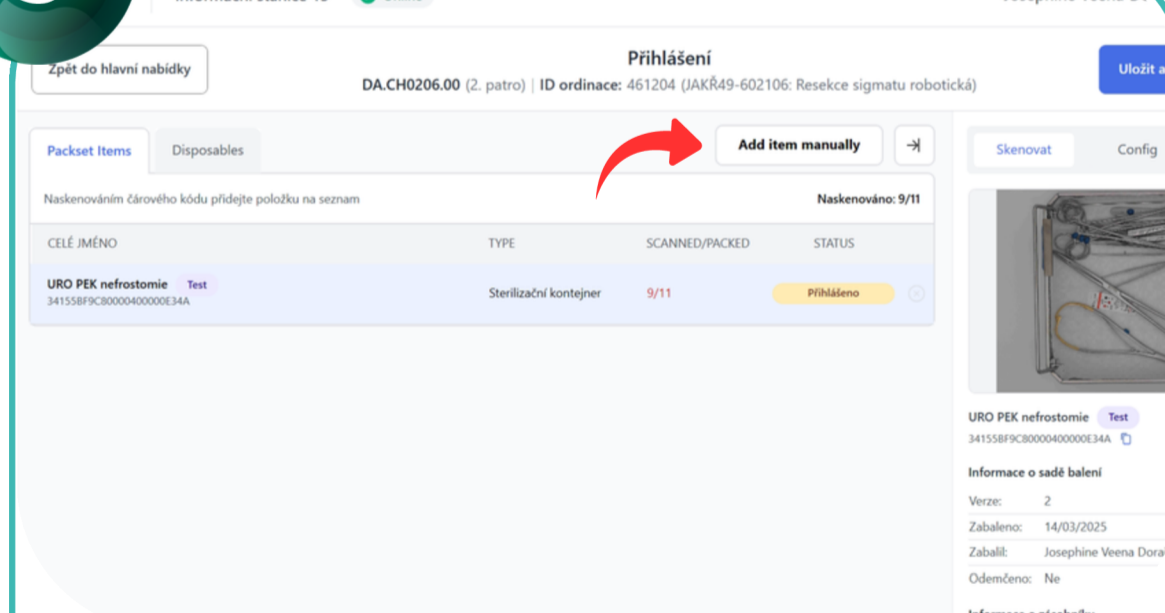

Je-li nutné přidat některé položky ručně, klepněte na „**Přidat položky ručně**“. Jinak přeskočte na krok 8.

6

Vyberte přidávané položky ze seznamu nebo podle čárového kódu (krok 7).

7

Chcete-li přidat položky zadáním čárového nebo objednávacího kódu, klepněte na „**Zadejte čárový kód**“. Do pole vložte čárový nebo obj. kód a klepněte na „**Pokračovat**“.

8

Klepnutím na kartu „**Zadejte čárový kód**“ můžete zobrazit položky na jedno použití.

9

Aktuální relaci check-inu ukončíte klepnutím na tlačítko „**Uložit a pokračovat později**“.



Pro zobrazení rychlého průvodce naskenujte tento QR kód