

# How to Pack a Tray

**1**

Packing Station

**Login**  
Enter pin code

Petru Faurescu  
petru.faurescu@caretag.eu Switch User

• • • • • •

**Log In**

or

Log in with email and password

Enter 6 digit PIN to log in.

**2**

Packing Station  
Select one of the options below to continue

Scan Tray for packing Pack mini sets (pouch)

Pack Case Cart Scan Individual Item (Pouch)

Get Info  
Details and/or check-in View sessions

**Continue**

Select 'Scan Tray for packing'.

**3**

Scan Packing Tray  
Click to read the tray for packing

**Start scan**

Place the tray tag on the RFID reader to start packing. Click 'Start scan'.

**4**

Select Tray Type

a1.036

ORT TRAUM Osteotomie rozšíření - a1.036

Scan new tray **Continue**

Select the tray type and click 'Confirm'.

**5**

Setovací stanice 1 Online Petru Faures.

ORT TRAUM Osteotomie rozšíření  
a1.036 Edit

Select Unit  
Start typing to search an existing unit

Search

01

02

Scan new tray **Continue**

Select the unit and click 'Continue'.

**6**

Setovací stanice 1 Online

ORT TRAUM Osteotomie rozšíření #02

Scanned Items (1) Differences (13) Add manually Unlock Scan

Kostní dílko Stille žlábkové, 25 mm, 20 cm scanned! Packed: 1/14

FULL NAME	TYPE	BRAND/SKU	STATUS
Kostní dílko Stille, 15 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-124-15-07	Pending 0/1
Kostní dílko Stille, 25 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-124-25-07	Pending 0/1
Kostní dílko Stille žlábkové, 10 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-127-10-07	Pending 0/1
Kostní dílko Stille žlábkové, 15 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-127-15-07	Pending 0/1
Kostní dílko Stille žlábkové, 20 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-127-20-07	Pending 0/1
Kostní dílko Stille žlábkové, 25 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-127-25-07	Packed 1/1
na čepce dílko, síl. 18,5 cm	Instrument	KLS Martin 23-130-00-04	Pending 0/1

Details  
Material: Stain  
Length: 20/  
Tag Type: P  
Class Typ:

To start packing, place each item on the RFID scanner.

**7**

ORT TRAUM Osteotomie rozšíření #02

Scanned Items (1) Differences (13) **Unlock**

FULL NAME	TYPE	BRAND/SKU	STATUS
Kostní dláto Stille, 15 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-124-15-07	Pending 0/1
Kostní dláto Stille, 25 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-124-25-07	Pending 0/1
Kostní dláto Stille žlábkové, 10 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-127-10-07	Pending 0/1
Kostní dláto Stille žlábkové, 15 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-127-15-07	Pending 0/1
Kostní dláto Stille žlábkové, 20 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-127-20-07	Pending 0/1
Kostní dláto Stille žlábkové, 25 mm, 20 cm	Instrument	KLS Martin 23-127-25-07	Packed 1/1
Čepele dlát, síl. 18,5 cm	Instrument	KLS Martin 23-130-00-04	Pending 0/1

If extra items are needed, click **'Unlock'**. Otherwise, proceed to Step 9.

**8**

**Unlock tray**

Are you sure you want to unlock the tray and add items outside the recipe?

Reason: Missing instrument(s)

Note: missing one instrument

**Unlock**

To unlock, select a reason from the list and write a note. Then click **'Unlock'**.

**9**

ORT TRAUM Osteotomie rozšíření #02

Finish packing

When all items are scanned and the packing list is complete, click **'Finish packing'**.

**10**

**Enter Tray Details**

Enter final details to complete packing

Expiration: 6 months

**Submit**

Select expiration time and click **'Submit'**.

**11**

Associate to a Container

Scan container to continue

**Start container scanning**

Click **'Start container scanning'** and place the container tag on the RFID reader.

**12**

**Packing Completed**

Tray has been successfully assembled

Tray	ORT TRAUM Osteotomie rozšíření - 02
Tray Tag ID	34155BF9C8000040000E40D
Instrument Count	14
Container	Yes
Assembled By	Petru Faurescu
Date & Time	14/03/2025 10:37
Expires on	14/09/2025 11:37

**View Report** **Back to Home Screen**

Packing is completed.

