

Jak naložit transportní vozík

1

Setovací stanice
Pro pokračování vyberte jednu z níže uvedených možností

Vyberte možnost **„Výdej ze sterilního skladu“** a klikněte na **„Pokračovat“**.

2

Vybrat operaci

Nadcházející operace

Zvolte operaci a klepněte na **„Pokračovat“**.

3

Výběr transportního vozíku

Klepněte na **„Skenovat transportní vozík“** a načtěte čip transportního vozíku.

4

Details operation jsou nyní zobrazeny.

5

Potřebujete-li udělat změny vůči objednavce, klepněte na **„Odemknout“**. Jinak přeskočte na krok 7.

6

Vyplňte důvod změny do pole **„Poznámka“** a klepněte na **„Odemknout“**.

7

Naskenujte štítky všech kontejnerů, sít a sáčků pro zabalení vozíku. Jakmile jsou všechny položky zabaleny, klepněte na „**Dokončit**“.

8

Klepněte na „**Ano, dokončit operaci**“.

9

V případě neshod zadejte PIN a klepněte na „**Vynutit dokončení**“.

10

✓ **Balení dokončeno**

Transportní vozík uzavřený bylo zabaleno; přečtěte si prosím níže uvedený souhrn:

Sál č.6 ROBOT (2. patro);

| Item | Status |
|---|--------|
| ORT TRAUM Osteotomie rozšíření 02 | 1/0 ✓ |
| Operační plášť zavínavací vyztužený Spunlance 150 cm , 32 ks v 1bal | 0/0 ✓ |
| GYN GEN URO Základní (a1.001) | 0/1 ✗ |
| GYN GEN URO Základní břišní | 0/1 ✗ |
| Misky- malá operace | 0/1 ✗ |
| Monopolární elektrokoagulace doplňky (a1.109) | 0/1 ✗ |
| 5 mm - 8 mm Cannula Seal- cena za balení 216 Fur | 0/3 ✗ |

Souhrn: Sady 1/4, Sáčky 0/0, Jednorázové 0/117, Celkový počet položek 1/121

Zpět na domovskou obrazovku

Nakládání vozíku je dokončeno.



Pro zobrazení rychlého průvodce naskenujte tento QR kód